

GefreMed Gesellschaft für regenerative Medizin mbH
Moritzstraße 19 / 09111 Chemnitz

Tel.: 0371 / 27 37 2318
Fax: 0371 / 27 37 2311

E-Mail: info@gefremed.de

Praxisstempel:



MagFlow

Arthrose
Schmerz
Gelenkbeschwerden



GefreMed
Gesellschaft für regenerative Medizin



GefreMed
Gesellschaft für regenerative Medizin

Was passiert?

Die starken magnetischen Wechselfelder, die MagFlow während des Betriebes erzeugt, induzieren im Gewebe intensive elektromagnetische Wirkfelder. Hierdurch werden selbst in 3 bis 4 cm Gewebstiefe noch die Schwellenwerte für wichtige zelluläre Regenerations- und Differenzierungsprozesse überschritten.

Das ermöglicht erstmalig die direkte Einwirkung auf gestörte Zellfunktionen im Sinne ihrer Normalisierung und Regeneration. Da ein Magnetfeld ungeschwächt durch Knochen hindurchgeht, ist es ideal für heilungsfördernde Ströme, unabhängig von den anatomischen Gegebenheiten.

Wann nicht anwenden?

Der MagFlow ist nicht anzuwenden, wenn der Patient ein metallisches oder metallkeramisches Implantat besitzt oder der Verdacht einer Schwangerschaft oder einer Infektion besteht.

In Herznähe darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung eines Arztes behandelt werden. Dies gilt ebenfalls für Patienten mit Thrombose-Neigung, mit Neigung zu Krämpfen sowie bei Diabetikern, die sich im Bereich des Pankreas behandeln wollen.

Wozu MagFlow?

Der MagFlow dient zur Aktivierung von Selbstheilungsprozessen. Durch pulsierende Magnetfelder werden Informationen an die Zellen übertragen. Das Gerät wird vornehmlich zur lokalen Therapie folgender Krankheitsbilder eingesetzt:

- **Schmerzen bei Sportverletzungen**
- **Mangelnde Durchblutung**
- **Schwellungen und Ödeme**
- **Gelenkbeschwerden / Arthrose**
- **Schwer heilende Wunden**



MagFlow
ist ein zugelassenes Medizinprodukt



0494